



ELEKTROPORACIJA (MEZOTERAPIJA BEZ IGLE)

Delux DEP


Mezoterapija bez igala

Elektroporacija (mezoterapija bez igle)

Uređaj kroz kožu propušta kratke, kontrolirane električne impulse koji privremeno i reverzibilno otvaraju mikropore u membranama stanica (fenomen elektroporacije). Kroz te pore velike aktivne molekule, koje inače teško prolaze kožnu barijeru, dopijevaju duboko u epidermis i dermis.

Princip djelovanja

Nakon prestanka impulsa pore se same zatvaraju, a uneseni sastojci ostaju u dubljim slojevima gdje djeluju. Za razliku od klasične mezoterapije, nema uboda, krvarenja ni oporavka. Često se kombinira s drugim modalitetima (npr.

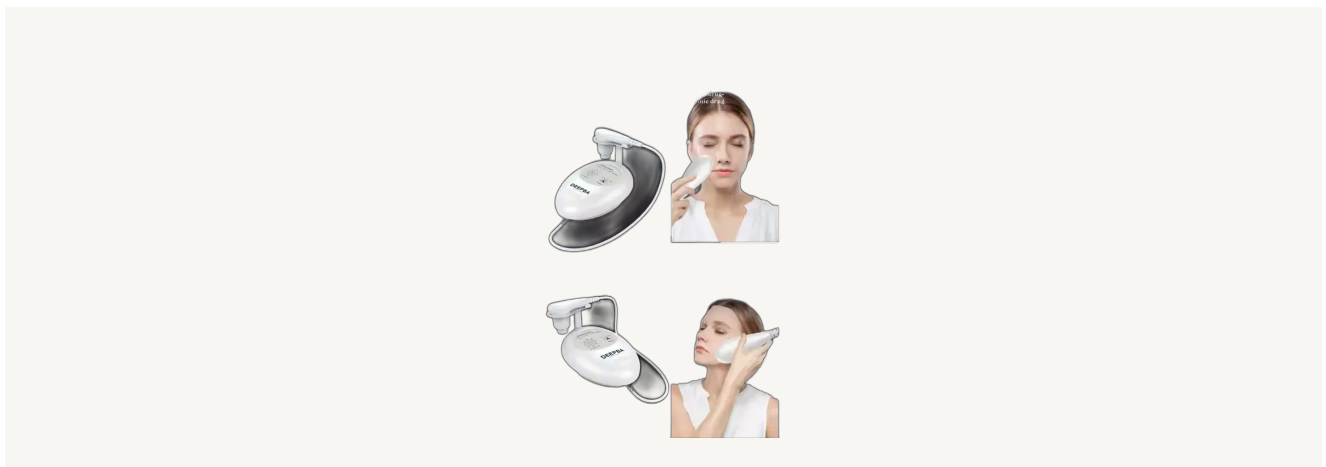

Što se realno postiže

Odmah nakon tretmana koža je vidljivo hidratiranija, punija i sjajnija, bez crvenila i oporavka. Kroz seriju tretmana kumulativno se poboljšavaju tonus, elastičnost i ujednačenost tena te se smanjuju fine bore. Rezultati su najbolji uz redovitu kuru, održavanje i odgovarajuću kućnu njegu.

Ključne prednosti

Rezultat mezoterapije, bez igle

Klasična mezoterapija oštećuje kožu iglama; elektroporacija ne — mikrokanali se zatvaraju odmah, bez crvenila.

Bez oporavka

Klijentica odmah nastavlja dan; idealan drugi korak nakon čišćenja ili microneedlinga u razmaknutim terminima.

Za koje tretmane

Dehidrirana koža

Fine linije i bore

Neujednačen ten

Podočnjaci

Vrat i dekolte

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana za vidljiv rezultat (najčešće kura od 6–8)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

1–2 tjedna (u početnoj kuri najčešće jednom tjedno)

Tijek tretmana u salonu

Elektroporacija (mezoterapija bez igle) koristi se za dubinski unos aktivnih sastojaka u kožu lica, vrata i dekoltea, a primjenjuje se i na tijelu. Idealna je za intenzivnu hidrataciju (hijaluronska kiselina), posvjetljivanje i ujednačavanje tena, anti-age tretmane (peptidi, kolagen, vitamini C i A) te smanjenje finih bora. Pogodna je za osjetljivu kožu koja ne podnosi iglice i za klijente koji izbjegavaju invazivne zahvate. Često se koristi i za pripremu kože te pojačavanje učinka drugih tretmana.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker) ili drugi implantirani elektronički uređaji — tretman koristi električnu energiju.
- Trudnoća i dojenje.
- Epilepsija i neurološki poremećaji sa sklonošću napadajima.
- Maligne (onkološke) bolesti te tijekom kemoterapije ili radioterapije.
- Metalni implantati, pločice ili opsežni zubni implantati u zoni tretmana.
- Srčane aritmije i teže srčane bolesti.
- Aktivne infekcije, upale, herpes, akne, ekcem ili otvorene rane u zoni tretmana.
- Poremećaji zgrušavanja krvi ili antikoagulantna terapija (relativna kontraindikacija).
- Nekontrolirani (dekompenzirani) dijabetes.
- Alergija na sastojke seruma koji se unose.
- Kožne bolesti u aktivnoj fazi (psorijaza, dermatitis) u zoni tretmana.
- Nedavni invazivni ili laserski zahvat na istom području — do oporavka kože.

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Tehnologija	Elektroporacija (DeepPor™)
Princip	Mikrokanali se zatvaraju sekundama nakon impulsa

Česta pitanja

Osjeća li se struja?

Osjeti se blago pulsiranje ili trnci, potpuno bezbolno; intenzitet se prilagođava.

Kada se vide rezultati?

Hidratacija i sjaj odmah; strukturne promjene (bore, ten) nakon 3–4 tretmana.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska