



RADIOFREKVENCIJA (RF)

Delux Face L

Profesionalna platforma za pomlađivanje lica

Radiofrekvencija (RF)

RF uređaj stvara izmjeničnu elektromagnetsku struju visoke frekvencije koja prolazi kroz kožu i, zbog otpora tkiva (prvenstveno vode u koži), pretvara se u toplinu. Za razliku od lasera, RF ne cilja pigment pa je siguran i primjenjiv na svim fototipovima kože, uključujući tamniju kožu.

Princip djelovanja

Toplina se kontrolirano dovodi u dermis (otprilike 100–400 µm ispod površine), gdje zagrijava kolagena vlakna do terapijske razine (površina kože oko 40–43 °C, uz zagrijavanje dermisa do temperature denaturacije kolagena, otprilike 60–65 °C). Trenutačni učinak je stezanje (kontrakcija) postojećih kolagenih vlakana, što daje odmah vidljivo blago zatezanje. Dugoročno, kontrolirana toplinska stimulacija pokreće prirodan proces obnove u kojem fibroblasti stvaraju novi kolagen i elastin (neokolagenaza) tijekom sljedećih tjedana i mjeseci.



Što se realno postiže

Blago zatezanje često je vidljivo već odmah nakon tretmana, zbog trenutačne kontrakcije kolagena, no taj je učinak prolazan. Pravi i trajniji rezultati grade se postupno, kako nastaje novi kolagen — obično se počinju jasno vidjeti nakon 4 do 12 tjedana, a najbolji učinak vidljiv je po završetku cijele serije tretmana. Klijenti realno mogu očekivati čvršću, zategnutiju i glađu kožu, poboljšani tonus i teksturu te blago smanjenje sitnih bora i celulita — no RF ne zamjenjuje kirurški lifting kod izraženijeg viška kože.

Ključne prednosti

Sinkronizirana RF + elektrostimulacija

Radiofrekvencija obnavlja površinu i zaglađuje kožu zagrijavanjem dermisa, dok pulsirajuća magnetska tehnologija...

75.000 impulsa u 20 minuta

Isti intenzitet tehnologije kao Face M — svaki tretman generira oko 75.000 ciljanih impulsa za lifting mišića lica.

Face L ili Face M?

Face L i Face M dijele istu temeljnu RF+EMS tehnologiju (1 Tesla, 1 MHz, 75.000 impulsa) — razlikuju se u formatu i...

Za koje tretmane

Opuštena koža lica i vrata

Bore i fine linije

Spuštene konture

Umoran ten

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (za većinu klijenata 6–8, ovisno o području i stanju kože)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

1–2 tjedna za lice; kod tijela i izraženijeg zatezanja 3–4 tjedna (radi razvoja novog kolagena)

Tijek tretmana u salonu

Radiofrekvencija se koristi za neinvazivno zatezanje i pomlađivanje kože te za oblikovanje tijela. Na licu se primjenjuje za zatezanje ovala lica i linije čeljusti, podizanje obraza, ublažavanje sitnih bora i mimičkih linija, tretman područja oko očiju, čela, vrata i podbratka te za poboljšanje tonusa i teksture kože. Na tijelu se koristi za zatezanje popuštene kože trbuha (primjerice nakon poroda ili mršavljenja), nadlaktica, bedara, stražnjice i koljena. Vrlo je učinkovita i u tretmanima celulita te oblikovanja siluete, osobito u kombinaciji s vakuumom ili kavitacijom.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje
- Ugrađeni elektronički uređaji: pacemaker (srčani stimulator), ugradbeni defibrilator (ICD), neurostimulator ili slušni (kohlearni) implantat
- Metalni implantati, pločice, vijci, žice, zglobne endoproteze ili zubni implantati u području koje se tretira
- Zlatne niti i drugi trajni metalni implantati za podizanje/zatezanje kože (thread lift) u zoni tretmana
- Metalna intrauterina spirala kod tretmana donjeg dijela trbuha (oprez)
- Aktivna maligna (onkološka) bolest te nedavna kemoterapija ili radioterapija
- Aktivna infekcija, upala, otvorene rane, dermatitis ili ekcem na tretiranom području
- Aktivni herpes ili afte u zoni tretmana (potrebna prethodna antivirusna profilaksa)
- Uzimanje izotretinoina (Roaccutane) unutar posljednjih 6–12 mjeseci
- Autoimune i sistemske bolesti vezivnog tkiva (npr. lupus, sklerodermija, reumatoidni artritis)
- Nereguliran (nekontroliran) dijabetes te neuropatija s poremećenim osjetom topline u tretiranom području
- Epilepsija i drugi konvulzivni poremećaji
- Sklonost keloidima i hipertrofičnim ožiljcima
- Poremećaji zgrušavanja krvi i terapija antikoagulansima (osobito kod mikroiglične RF)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



EMT snaga	1 Tesla
RF frekvencija	1 MHz
RF izlazna snaga	30 W
Trajanje tretmana	~20 minuta (cijelo lice)
Načini rada	5 (50, 85, 100, 166 Hz i kombinirani 80/10/25 Hz)
Impulsi po tretmanu	~75.000

Česta pitanja

Kako izgleda tretman?

Aplikatori se postavljaju na lice; osjeća se toplina (RF) i ritmične, bezbolne kontrakcije mišića.

Vidi li se rezultat odmah?

Da, prvi lifting efekt vidljiv je nakon prvog tretmana; puni rezultat gradi se kroz seriju.

Po čemu se razlikuje od Face M?

Tehnički su gotovo identični (ista snaga, frekvencija i broj impulsa) — razlika je u dizajnu i ergonomiji uređaja.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska