



OKSIGENACIJA

Delux Oxy

Kisik do 93,3% čistoće, rezultat odmah

Oksigenacija

Uređaj proizvodi struju čistog kisika pod povišenim (hiperbaričnim) tlakom koja se aplikatorom usmjerava na kožu s minimalne udaljenosti, stvarajući svojevrsni tlačni "jastuk" kisika iznad epidermisa. Taj tlak omogućuje dublji i ravnomjerniji prodor aktivnih seruma u kožu, najčešće onih na bazi hijaluronske kiseline, vitamina i antioksidansa, pa koža trenutno djeluje popunjeno i zaglađeno.

Princip djelovanja

Djelovanje se temelji na osmotskoj hidrataciji: lagana hijaluronska kiselina veže vodu u koži i zadržava vlagu na više razina epidermisa. Kisik pritom djeluje i kao prirodni baktericid jer razgrađuje anaerobne bakterije, što je korisno kod kože sklone nečistoćama. Povišena razina kisika u koži potiče staničnu aktivnost, diferencijaciju keratinocita i rad fibroblasta, čime se posredno podupire sinteza kolagena.



Što se realno postiže

Prvi su rezultati vidljivi odmah nakon prvog tretmana: koža je hidriranija, punija, blistavija i vidljivo odmornija, a fine linije uzrokovane suhoćom postaju manje izražene. Ten je ujednačeniji, a koža ugodno svježa i mekana na dodir. Učinak jednog tretmana obično traje od nekoliko dana do otprilike jednog do dva tjedna, ovisno o stanju i tipu kože te njezi kod kuće.

Ključne prednosti

Čista uгода, vidljiv rezultat

Hladan, osvježavajući mlaz bez ikakve nelagode, a rezultat se vidi odmah — savršen "uvodni" tretman za nove...

Idealno za osjetljivu kožu i rozaceu

Nema mehaničke ni termičke iritacije, pa je oxygen facial prvi izbor kod osjetljive kože.

Izvrstan add-on

Kao "finiš kisikom" na bilo koji facial tretman — pojačava unos aktivnih tvari nakon čišćenja ili mezoterapije.

Za koje tretmane

Umorna koža

Dehidracija

Sivkast ten

Priprema za posebne prigode

BROJ TRETMANA

Za vidljiv i trajniji rezultat preporučuje se serija od 6 tretmana (kod izraženije dehidracije ili problematične kože 6-10 tretmana), nakon čega slijede tretmani održavanja.

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

Tretmani u seriji provode se u razmaku od 1 do 2 tjedna, a nakon završene serije održavanje svakih 4 do 6 tjedana.

Tijek tretmana u salonu

Oksigenacija se prvenstveno primjenjuje na licu, ali se jednako uspješno provodi i na vratu, dekolteu te nadlanicama, dakle na područjima koja pokazuju znakove dehidracije i umora. Namijenjena je prije svega dehidriranoj, umornoj i beživotnoj koži bez sjaja, kojoj vraća punoću i svježinu. Vrlo je učinkovita za izravnavanje tena i tonusa, ublažavanje finih linija nastalih zbog manjka vlage te za oporavak kože nakon izlaganja suncu, hladnoći ili gradskom onečišćenju. Zbog nježnog i neinvazivnog djelovanja pogodna je i za osjetljivu kožu te kožu sklonu crvenilu, koju ne iritira.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje – obavezno obavijestiti terapeuta; tretman provoditi samo uz oprez i savjet liječnika
- Aktivna herpes infekcija (herpes na usnama/licu) ili bradavice na području tretmana
- Aktivne kožne infekcije (bakterijske, virusne ili gljivične), npr. impetigo, na području tretmana
- Otvorene rane, posjekotine, ogrebotine ili na drugi način oštećena koža na području tretmana
- Sunčane opekline, jako nadražena ili upaljena koža
- Teški oblici akni (cistične, gnojne, aktivne upalne akne)
- Aktivni upalni val rozaceje, ekcema, dermatitisa ili psorijaze na području tretmana
- Uzimanje izotretinoina (Roaccutane) – pričekati najmanje 6 mjeseci nakon prekida terapije
- Nedavni agresivni tretmani na istom području (kemijski piling, laser, dermabrazija/mikrodermoabrazija, depilacija voskom) – poštivati razmak oporavka
- Nedavni kirurški zahvati, dermalni fileri ili botoks na području tretmana – poštivati preporučeni razmak
- Poznata onkološka bolest ili anamneza karcinoma kože – tretman samo uz odobrenje/savjet liječnika (osobito karcinom na području tretmana)
- Nekontrolirani dijabetes, nereguliran visoki krvni tlak ili srčane bolesti – prethodna konzultacija / pisano odobrenje liječnika
- Poremećaji zgrušavanja krvi ili terapija antikoagulansima (zbog eksfolijacijske komponente tretmana)
- Teže sistemske ili autoimune bolesti (npr. bubrežna/jetrena bolest, aktivna upala, vrućica) – samo uz savjet liječnika

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Čistoća kisika	do 93,3%
Princip	Kisikova infuzija seruma pod kontroliranim tlakom

Česta pitanja

Je li tretman pogodan za osjetljivu kožu i rozaceu?

Da — upravo je kod osjetljive kože oxygen facial prvi izbor jer nema mehaničke ni termičke iritacije.

Koliko dugo traje efekt?

Trenutni glow traje nekoliko dana; uz seriju tretmana koža dugoročno dobiva na kvaliteti i hidrataciji.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska