



ENDOSFERA / ROLLER

Delux Roller Endosfera

Endosfera — fitness za kožu i limfu

Endosfera / roller

Uređaj radi preko valjka (rollera) na kojem se nalazi niz mekih, hipoalergenih silikonskih kuglica (tipično 55 kuglica raspoređenih u saćastom rasporedu) koje se rotiraju i tako stvaraju istovremeno kompresiju i niskofrekventne mehaničke mikrovibracije. Te se vibracije prenose u različite slojeve tkiva, a frekvencija se može podešavati (u rasponu od približno 29 do 360 Hz) ovisno o području i cilju tretmana.

Princip djelovanja

Djelovanje se odvija kroz nekoliko mehanizama: mikrovibracija potiče limfnu drenažu i izbacivanje suvišne tekućine i metaboličkih otpadnih tvari, kompresija aktivira mišićni tonus i pospješuje cirkulaciju, a poboljšana mikrocirkulacija povećava dotok kisika i hranjivih tvari u tkivo te ima protuupalni učinak. Mehanička stimulacija djeluje i na potkožno vezivno i masno tkivo te potiče remodeliranje kože, čime se smanjuje izraženost "narančine kore". Za razliku od vakuumskih uređaja, metoda ne rasteže i ne usisava kožu, pa je ugodnija i s manjim rizikom od modrica.



Što se realno postiže

Osjećaj lakoće nogu, smanjene napetosti i blage drenaže mnogi klijenti primijete već nakon prvog tretmana, no za vidljive estetske rezultate potrebna je serija tretmana. Prvi vidljivi pomaci u zaglađenosti kože i smanjenju opsega obično se zapažaju nakon 4 do 6 tretmana, a puni rezultat vidi se nakon završene serije (najčešće oko 12 tretmana). Objavljeni podaci navode prosječno smanjenje mjerenih pokazatelja celulita za oko 40% nakon 12 tretmana kroz pet tjedana, uz smanjenje opsega, čvršću kožu i ujednačeniji ten.

Ključne prednosti

Pet učinaka jednog tretmana

Smanjenje celulita, smanjenje opsega, limfna drenaža, povećana elastičnost kože, terapijsko opuštanje.

Klijentice ga doživljavaju kao užitek

Neinvazivno, bez oporavka — visoka stopa ponovnih dolazaka i pretplatničkih paketa.

Savršen par: Roller + DeLux Deep

Dubinsko RF zagrijavanje pa mehanička drenaža — premium anticelulitni protokol.

Za koje tretmane

Celulit

Limfna drenaža

Oblikovanje tijela

Zatezanje kože

BROJ TRETMANA

Za tijelo se preporučuje 8–12 tretmana za vidljiv rezultat (kod blagog celulita 6–8, kod izraženog i fibroznog celulita 12–18 tretmana). Za lice obično 4–6 tretmana.

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

2–3 puta tjedno, uz razmak od najmanje 48–72 sata (2–3 dana) između tretmana; za tretmane održavanja 1–2 puta mjesečno.

Tijek tretmana u salonu

Endosfera terapija koristi se za neinvazivno oblikovanje tijela, smanjenje celulita, poticanje limfne drenaže i poboljšanje kvalitete i tonusa kože. Na tijelu se najčešće primjenjuje na područjima sklonima celulitu i zadržavanju tekućine, poput bedara, stražnjice, bokova, trbuha i nadlaktica, ali i za ublažavanje osjećaja teških, otečenih nogu te za poboljšanje mikrocirkulacije. Indicirana je kod svih stadija celulita (od blagog do izraženog, fibroznog), kod zadržavanja tekućine i limfnog edema, mlohavie kože nakon mršavljenja ili poroda, te za tonizaciju mišića i općeniti "body contouring". Na licu se primjenjuje kao nježan lifting i drenažni tretman: pomaže smanjiti podbuhlost i zadržavanje tekućine, ujednačiti ten, poboljšati tonus i elastičnost kože te ublažiti izgled sitnih bora, osobito u području vrata, linije vilice, obraza i oko očiju.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i razdoblje dojenja (tretman potiče snažnu limfnu drenažu; u dojenju samo uz suglasnost liječnika, u pravilu nakon 6 mjeseci)
- Aktivna maligna (onkološka) bolest ili onkološko liječenje bez izričitog odobrenja liječnika; kod izliječenih pacijenata (osobito unutar 5 godina od dijagnoze) potrebna...
- Duboka venska tromboza, tromboflebitis, aktivni tromb ili flebitis (rizik od otpuštanja ugruška)
- Poremećaji zgrušavanja krvi te terapija antikoagulantima (sklonost modricama) – potreban oprez i savjet liječnika
- Akutne upale, vrućica, infekcije ili opće loše (upalno) stanje organizma
- Akutne i zarazne kožne bolesti te promjene u zoni tretmana: herpes, teži (upalni) oblici akni, dermatitis, ekcem, psorijaza, rozacea i druge dermatoze te kožne infekcije...
- Otvorene rane, opekline, iritacije, svježi ožiljci ili neizliječeni kirurški rez u zoni tretmana
- Nedijagnosticirane kvržice, otekline, sumnjivi madeži ili nejasne kožne promjene u zoni tretmana - ne tretirati do liječničke procjene
- Teže i nekontrolirane srčane bolesti, nekontrolirana hipertenzija te teži poremećaji periferne (arterijske) cirkulacije
- Teža bubrežna ili jetrena insuficijencija te stanje nakon transplantacije organa (imunosupresija) - samo uz odobrenje liječnika
- Ugrađen srčani stimulator (pacemaker), defibrilator ili drugi elektronički implantati - relativna kontraindikacija; uređaj je čisto mehanički (mikrovibracija, bez električne...
- Dijabetes s komplikacijama (npr. periferna neuropatija, otežano cijeljenje) - potreban oprez
- Aktivne autoimune ili sistemske bolesti u fazi pogoršanja - potreban savjet liječnika
- Metalni implantati, endoproteze, kirurške mrežice ili drugi ugrađeni materijali u zoni tretmana - ne pritiskati izravno preko implantata; potreban oprez i po potrebi...

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.

Glava	rotirajuća, silikonske kuglice
Djelovanje	kompresija + mikrovibracija

Česta pitanja

Boli li tretman?

Ne — intenzitet se prilagođava; većina klijentica opisuje ga kao snažnu, ugodnu masažu.

Kada se vide rezultati na celulitu?

Tekstura kože nakon 3–4 tretmana; puni rezultat nakon serije od 8–12.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska