



RADIOFREKVENCIJA (RF)

# Delux Shape 3

Naš najnapredniji uređaj za oblikovanje tijela

## Radiofrekvencija (RF)

RF uređaj stvara izmjeničnu elektromagnetsku struju visoke frekvencije koja prolazi kroz kožu i, zbog otpora tkiva (prvenstveno vode u koži), pretvara se u toplinu. Za razliku od lasera, RF ne cilja pigment pa je siguran i primjenjiv na svim fototipovima kože, uključujući tamniju kožu.

### Princip djelovanja

Toplina se kontrolirano dovodi u dermis (otprilike 100–400 µm ispod površine), gdje zagrijava kolagena vlakna do terapijske razine (površina kože oko 40–43 °C, uz zagrijavanje dermisa do temperature denaturacije kolagena, otprilike 60–65 °C). Trenutačni učinak je stezanje (kontrakcija) postojećih kolagenih vlakana, što daje odmah vidljivo blago zatezanje. Dugoročno, kontrolirana toplinska stimulacija pokreće prirodan proces obnove u kojem fibroblasti stvaraju novi kolagen i elastin (neokolagenaza) tijekom sljedećih tjedana i mjeseci.



### Što se realno postiže

Blago zatezanje često je vidljivo već odmah nakon tretmana, zbog trenutačne kontrakcije kolagena, no taj je učinak prolazan. Pravi i trajniji rezultati grade se postupno, kako nastaje novi kolagen — obično se počinju jasno vidjeti nakon 4 do 12 tjedana, a najbolji učinak vidljiv je po završetku cijele serije tretmana. Klijenti realno mogu očekivati čvršću, zategnutiju i glađu kožu, poboljšani tonus i teksturu te blago smanjenje sitnih bora i celulita — no RF ne zamjenjuje kirurški lifting kod izraženijeg viška kože.

### Ključne prednosti

#### Pet tehnologija u jednom uređaju

RF, vakuum terapija, ultrazvuk, lasersko svjetlo i EMS — rješava ono na čemu jednostavniji uređaji staju: tvrdokorni...

#### Kombinirani aplikator

Za najtvrdokorniji celulit i zahtjevne body protokole — više tehnologija istovremeno u jednom prelasku.

#### Savršen par: Shape III + Tesla HIEMT

Shape III smanjuje masnoću i celulit te zateže kožu, Tesla gradi mišić — kompletan protokol transformacije tijela.

## Za koje tretmane

Tvrdekorni celulit

Trbuh, bokovi, bedra, nadlaktice

Lifting lica, vrata i dekoltea

Limfna drenaža

### BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (za većinu klijenata 6–8, ovisno o području i stanju kože)

### RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

1–2 tjedna za lice; kod tijela i izraženijeg zatezanja 3–4 tjedna (radi razvoja novog kolagena)

### Tijek tretmana u salonu

Radiofrekvencija se koristi za neinvazivno zatezanje i pomlađivanje kože te za oblikovanje tijela. Na licu se primjenjuje za zatezanje ovala lica i linije čeljusti, podizanje obraza, ublažavanje sitnih bora i mimičkih linija, tretman područja oko očiju, čela, vrata i podbratka te za poboljšanje tonusa i teksture kože. Na tijelu se koristi za zatezanje popuštene kože trbuha (primjerice nakon poroda ili mršavljenja), nadlaktica, bedara, stražnjice i koljena. Vrlo je učinkovita i u tretmanima celulita te oblikovanja siluete, osobito u kombinaciji s vakuumom ili kavitacijom.

### Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje
- Ugrađeni elektronički uređaji: pacemaker (srčani stimulator), ugrađeni defibrilator (ICD), neurostimulator ili slušni (kohlearni) implantat
- Metalni implantati, pločice, vijci, žice, zglobove endoproteze ili zubni implantati u području koje se tretira
- Zlatne niti i drugi trajni metalni implantati za podizanje/zatezanje kože (thread lift) u zoni tretmana
- Metalna intrauterina spirala kod tretmana donjeg dijela trbuha (oprez)
- Aktivna maligna (onkološka) bolest te nedavna kemoterapija ili radioterapija
- Aktivna infekcija, upala, otvorene rane, dermatitis ili ekcem na tretiranom području
- Aktivni herpes ili afte u zoni tretmana (potrebna prethodna antivirusna profilaksa)
- Uzimanje izotretinoina (Roaccutane) unutar posljednjih 6–12 mjeseci
- Autoimune i sistemske bolesti vezivnog tkiva (npr. lupus, sklerodermija, reumatoidni artritis)
- Nereguliran (nekontroliran) dijabetes te neuropatija s poremećenim osjetom topline u tretiranom području
- Epilepsija i drugi konvulzivni poremećaji
- Sklonost keloidima i hipertrofičnim ožiljcima
- Poremećaji zgrušavanja krvi i terapija antikoagulansima (osobito kod mikroiglične RF)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na [www.deluxart.hr](http://www.deluxart.hr).



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Radiofrekvencija (RF) | zateže kožu, potiče sintezu kolagena        |
| Vakuum terapija       | limfni protok, smanjenje celulita           |
| Ultrazvuk             | razgradnja masnih naslaga, smanjenje obujma |
| Lasersko svjetlo      | regeneracija i pomlađivanje kože            |
| EMS                   | električna stimulacija mišića               |

## Česta pitanja

### Po čemu je Shape III bolji od Shape 2?

Dodaje EMS, rolere i kombinirani aplikator — ključne alate za tvrdokorni celulit i napredne protokole.

### Je li dostupan za najam?

Da — kratkoročno ili dugoročno, uz obuku, podršku i jamstvo.

## Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



## Zatražite ponudu i demonstraciju

### TELEFON

+385 98 862 670  
+385 95 512 3245

### E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr  
www.deluxart.hr

### ADRESA

Zagrebačka avenija 5  
10000 Zagreb, Hrvatska