



RADIOFREKVENCIJA (RF)

Delux Shape Ultimate

Nova generacija oblikovanja tijela

Radiofrekvencija (RF)

RF uređaj stvara izmjeničnu elektromagnetsku struju visoke frekvencije koja prolazi kroz kožu i, zbog otpora tkiva (prvenstveno vode u koži), pretvara se u toplinu. Za razliku od lasera, RF ne cilja pigment pa je siguran i primjenjiv na svim fototipovima kože, uključujući tamniju kožu.

Princip djelovanja

Toplina se kontrolirano dovodi u dermis (otprilike 100–400 μm ispod površine), gdje zagrijava kolagena vlakna do terapijske razine (površina kože oko 40–43 °C, uz zagrijavanje dermisa do temperature denaturacije kolagena, otprilike 60–65 °C). Trenutačni učinak je stezanje (kontrakcija) postojećih kolagenih vlakana, što daje odmah vidljivo blago zatezanje. Dugoročno, kontrolirana toplinska stimulacija pokreće prirodan proces obnove u kojem fibroblasti stvaraju novi kolagen i elastin (neokolagenaza) tijekom sljedećih tjedana i mjeseci.



Što se realno postiže

Blago zatezanje često je vidljivo već odmah nakon tretmana, zbog trenutačne kontrakcije kolagena, no taj je učinak prolazan. Pravi i trajniji rezultati grade se postupno, kako nastaje novi kolagen — obično se počinju jasno vidjeti nakon 4 do 12 tjedana, a najbolji učinak vidljiv je po završetku cijele serije tretmana. Klijenti realno mogu očekivati čvršću, zategnutiju i glađu kožu, poboljšan tonus i teksturu te blago smanjenje sitnih bora i celulita — no RF ne zamjenjuje kirurški lifting kod izraženijeg viška kože.

Ključne prednosti

Ultrazvučna ručka

Jedina u Delux Shape liniji s ultrazvučnom probom — dodatna dubina tretmana koju Shape 3 ne nudi.

Najnoviji dizajn

Dio nove Delux Art Laser Systems dizajn linije — antracit, mat crna i plava LED signalizacija.

5 tehnologija u jednom uređaju

RF, vakuum, roller, kavitacija i ultrazvuk — kompletno rješenje za oblikovanje tijela u jednom uređaju.

Za koje tretmane

Trbuh

Bokovi

Bedra

Ruke

Celulit

Zatezanje kože

Modeliranje tijela

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (za većinu klijenata 6–8, ovisno o području i stanju kože)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

1–2 tjedna za lice; kod tijela i izraženijeg zatezanja 3–4 tjedna (radi razvoja novog kolagena)

Tijek tretmana u salonu

Radiofrekvencija se koristi za neinvazivno zatezanje i pomlađivanje kože te za oblikovanje tijela. Na licu se primjenjuje za zatezanje ovala lica i linije čeljusti, podizanje obraza, ublažavanje sitnih bora i mimičkih linija, tretman područja oko očiju, čela, vrata i podbratka te za poboljšanje tonusa i teksture kože. Na tijelu se koristi za zatezanje popuštene kože trbuha (primjerice nakon poroda ili mršavljenja), nadlaktica, bedara, stražnjice i koljena. Vrlo je učinkovita i u tretmanima celulita te oblikovanja siluete, osobito u kombinaciji s vakuumom ili kavitacijom.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje
- Ugrađeni elektronički uređaji: pacemaker (srčani stimulator), ugradbeni defibrilator (ICD), neurostimulator ili slušni (kohlearni) implantat
- Metalni implantati, pločice, vijci, žice, zglobove endoproteze ili zubni implantati u području koje se tretira
- Zlatne niti i drugi trajni metalni implantati za podizanje/zatezanje kože (thread lift) u zoni tretmana
- Metalna intrauterina spirala kod tretmana donjeg dijela trbuha (oprez)
- Aktivna maligna (onkološka) bolest te nedavna kemoterapija ili radioterapija
- Aktivna infekcija, upala, otvorene rane, dermatitis ili ekcem na tretiranom području
- Aktivni herpes ili afte u zoni tretmana (potrebna prethodna antivirusna profilaksa)
- Uzimanje izotretinoina (Roaccutane) unutar posljednjih 6–12 mjeseci
- Autoimune i sistemske bolesti vezivnog tkiva (npr. lupus, sklerodermija, reumatoidni artritis)
- Nereguliran (nekontroliran) dijabetes te neuropatija s poremećenim osjetom topline u tretiranom području
- Epilepsija i drugi konvulzivni poremećaji
- Sklonost keloidima i hipertrofičnim ožiljcima
- Poremećaji zgrušavanja krvi i terapija antikoagulansima (osobito kod mikroiglične RF)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Ručka 1 — RF	Radiofrekvencija za zatezanje kože
Ručka 2 — Roller/vakuum	Vakuum masaža s rolanjem
Ručka 3 — Kavitacija	Razbijanje masnih naslaga
Ručka 4 — Ultrazvučna proba	Dodatna tehnologija koju Shape 3 nema
Dizajn	Antracit siva + mat crna + plava LED
Jamstvo	12 mjeseci, originalno

Česta pitanja

Koja je razlika između Shape 3 i Shape Ultimate?

Shape Ultimate ima dodatnu ultrazvučnu ručku koju Shape 3 nema, uz noviji antracit/crna/plava-LED dizajn.

Boli li tretman?

Ne, svi tretmani su bezbolni i bez razdoblja oporavka.

Dolazi li edukacija?

Da, besplatna obuka osoblja uključena je u cijenu.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



deluxart

Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska