



HYDRAFACIAL

Delux Station II

Nadograđena platforma za body & face

Hydrafacial

Tretman se odvija u više usklađenih koraka koji se izvode istim ručnim nastavkom. Najprije se koža čisti i eksfolira, a zatim slijedi blagi kiseli piling (najčešće s glikolnom i salicilnom kiselinom) koji omekšava i otapa nečistoće u porama.

Princip djelovanja

Ključ tehnologije je vrtložni (Vortex) protok tekućine kroz spiralni vrh nastavka: on istovremeno stvara blagi vakuum koji bezbolno izvlači mitesere i nečistoće te ispire pore, dok se koža natapa aktivnim serumima. U završnoj fazi u kožu se utiskuju hidratantni i njegujući sastojci poput hijaluronske kiseline, antioksidansa i peptida. Ovisno o modelu uređaja, tretman se može nadopuniti oksigenacijom (kisik pod pritiskom), ultrazvukom ili LED svjetlosnom terapijom.



Što se realno postiže

Rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana: koža je čišća, glađa, hidratiranija i vidljivo sjajnija, a pore su manje uočljive. Tretman nema razdoblje oporavka pa se klijent odmah može vratiti svakodnevnim aktivnostima. Učinak jednog tretmana obično traje oko 5 do 7 dana, nakon čega se koža postupno vraća u prethodno stanje.

Ključne prednosti

Kompletan body & face meni

Lipolaser, multipolarni RF s vakuumom, tripolarni i bipolarni RF — mršavljenje, celulit, smanjenje obujma i lifting...

Station I ili Station II?

Station II dodaje lipolaser aplikatore (4 velika + 2 mala, 635 nm) koje Station I nema — dodatna tehnologija za...

Za koje tretmane

Lokalizirane masne naslage

Celulit

Smanjenje obujma

Lifting lica

Limfna drenaža

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (početna kura); za osnovni sjaj i hidrataciju vidljiv rezultat i nakon jednog tretmana

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

svaka 2–4 tjedna tijekom kure, uz kasnije održavanje 1× mjesečno


Tijek tretmana u salonu

Hydrafacial je neinvazivan tretman dubinskog čišćenja, eksfolijacije, hidratacije i njege kože. Najčešće se primjenjuje na cijelom licu, ali i na vratu, dekolteu, leđima (kod začepljenih pora i akni na leđima) te nadlanicama. Rješava niz estetskih problema: začepljene i proširene pore, mitesere i komedone, masnu i mješovitu kožu, suhu i dehidriranu kožu te neujednačen ten i teksturu. Također ublažava prve znakove starenja poput sitnih bora, gubitka sjaja i blage mlitavosti, kao i hiperpigmentaciju i tamne mrlje.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje — kiseline pilinga (glikolna, salicilna) i aktivni sastojci mogu se sistemski apsorbirati; tretman izbjegavati ili samo uz trudnoći prilagođene serume bez...
- Poznata alergija ili preosjetljivost na sastojke seruma (hijaluronska kiselina, peptidi, antioksidansi) ili na kiseline pilinga (glikolna, salicilna)
- Alergija na aspirin/salicilate ili na sumpor — oprez zbog salicilne kiseline i sastojaka seruma
- Alergija na plodove mora i školjke — pojedini serumi sadrže sastojke morskog porijekla
- Aktivne upalne akne, ciste i pustule u naletu — eksfolijacija i vakuum mogu pogoršati upalu i proširiti infekciju
- Aktivna rozacea ili rozacea u naletu — sukcija i pojačan protok krvi mogu izazvati jako crvenilo i oštetiti kapilare
- Aktivni herpes (herpes simplex) i hladne rane na području tretmana
- Otvorene rane, posjekotine, sunčane opekline, aktivni dermatitis, ekcem, psorijaza ili osip na koži koja se tretira
- Aktivne kožne infekcije (bakterijske, virusne ili gljivične)
- Nedijagnosticirane ili sumnjive kožne promjene na području tretmana (madeži, izrasline, atipične lezije) — potrebna liječnička procjena prije tretmana
- Terapija izotretinoinom (Roaccutane) u zadnjih 6–12 mjeseci — pričekati potpuni oporavak kože
- Aktivna topikalna terapija retinoidima ili jakim kiselinama (AHA/BHA, tretmanski peelinzi) — prekinuti nekoliko dana prije tretmana
- Nedavni agresivni tretmani na istom području (kemijski piling, lasersko obnavljanje, IPL, dermabrazija) dok koža nije potpuno zacijeljena
- Nedavno primljeni botoks ili dermalni fileri — tretman odgoditi (obično 1–2 tjedna)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.

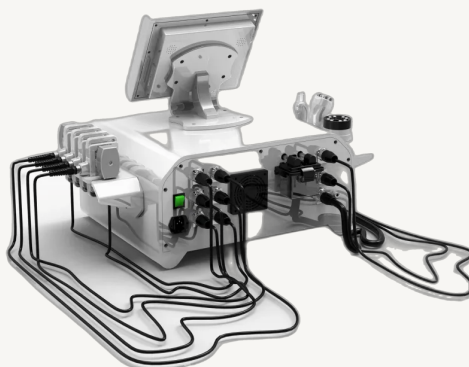

Lipolaser	4 velika aplikatora (10 dioda svaki, 635 nm) + 2 mala
RF s vakuumom	8-polni
RF tijelo	tripolarni
RF lice	bipolarni
Opcija	Dijamantna mikrodermoabrazija (9 nastavaka), 6-polni RF

Česta pitanja

Je li tretman bolan?

Ne; osjeća se toplina i blagi vakuum.

Mogu li testirati prije kupnje?

Da, kroz najam s mogućnošću kasnije kupnje.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



deluxart

Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska