



RADIOFREKVENCIJA (RF)

Delux TrueRF

Masnoća, mišić i koža — u jednom prelasku

Radiofrekvencija (RF)

RF uređaj stvara izmjeničnu elektromagnetsku struju visoke frekvencije koja prolazi kroz kožu i, zbog otpora tkiva (prvenstveno vode u koži), pretvara se u toplinu. Za razliku od lasera, RF ne cilja pigment pa je siguran i primjenjiv na svim fototipovima kože, uključujući tamniju kožu.

Princip djelovanja

Toplina se kontrolirano dovodi u dermis (otprilike 100–400 µm ispod površine), gdje zagrijava kolagena vlakna do terapijske razine (površina kože oko 40–43 °C, uz zagrijavanje dermisa do temperature denaturacije kolagena, otprilike 60–65 °C). Trenutačni učinak je stezanje (kontrakcija) postojećih kolagenih vlakana, što daje odmah vidljivo blago zatezanje. Dugoročno, kontrolirana toplinska stimulacija pokreće prirodan proces obnove u kojem fibroblasti stvaraju novi kolagen i elastin (neokolagenaza) tijekom sljedećih tjedana i mjeseci.

Što se realno postiže

Blago zatezanje često je vidljivo već odmah nakon tretmana, zbog trenutačne kontrakcije kolagena, no taj je učinak prolazan. Pravi i trajniji rezultati grade se postupno, kako nastaje novi kolagen — obično se počinju jasno vidjeti nakon 4 do 12 tjedana, a najbolji učinak vidljiv je po završetku cijele serije tretmana. Klijenti realno mogu očekivati čvršću, zategnutiju i glađu kožu, poboljšan tonus i teksturu te blago smanjenje sitnih bora i celulita — no RF ne zamjenjuje kirurški lifting kod izraženijeg viška kože.

Ključne prednosti

Zašto kombinacija pobjeđuje

Zagrijano tkivo bolje provodi impulse, aktivan mišić troši energiju iz okolnih masnih zaliha — RF+EMS je svjetski...

Bez viška kože

RF komponenta zateže kožu dok se obujam smanjuje — ključno kod mršavljenja.

Savršen par: TrueRF + Presoterapija

Nakon razgradnje masnoće i mišićnog rada, limfna drenaža odvodi metabolite.

Za koje tretmane

Trbuh

Bokovi

Bedra

Stražnjica

Nadlaktice

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (za većinu klijenata 6–8, ovisno o području i stanju kože)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

1–2 tjedna za lice; kod tijela i izraženijeg zatezanja 3–4 tjedna (radi razvoja novog kolagena)

Tijek tretmana u salonu

Radiofrekvencija se koristi za neinvazivno zatezanje i pomlađivanje kože te za oblikovanje tijela. Na licu se primjenjuje za zatezanje ovala lica i linije čeljusti, podizanje obraza, ublažavanje sitnih bora i mimičkih linija, tretman područja oko očiju, čela, vrata i podbratka te za poboljšanje tonusa i teksture kože. Na tijelu se koristi za zatezanje popuštene kože trbuha (primjerice nakon poroda ili mršavljenja), nadlaktica, bedara, stražnjice i koljena. Vrlo je učinkovita i u tretmanima celulita te oblikovanja siluete, osobito u kombinaciji s vakuumom ili kavitacijom.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća i dojenje
- Ugrađeni elektronički uređaji: pacemaker (srčani stimulator), ugrađeni defibrilator (ICD), neurostimulator ili slušni (kohlearni) implantat
- Metalni implantati, pločice, vijci, žice, zglobne endoproteze ili zubni implantati u području koje se tretira
- Zlatne niti i drugi trajni metalni implantati za podizanje/zatezanje kože (thread lift) u zoni tretmana
- Metalna intrauterina spirala kod tretmana donjeg dijela trbuha (oprez)
- Aktivna maligna (onkološka) bolest te nedavna kemoterapija ili radioterapija
- Aktivna infekcija, upala, otvorene rane, dermatitis ili ekcem na tretiranom području
- Aktivni herpes ili afte u zoni tretmana (potrebna prethodna antivirusna profilaksa)
- Uzimanje izotretinoina (Roaccutane) unutar posljednjih 6–12 mjeseci
- Autoimune i sistemske bolesti vezivnog tkiva (npr. lupus, sklerodermija, reumatoidni artritis)
- Nereguliran (nekontroliran) dijabetes te neuropatija s poremećenim osjetom topline u tretiranom području
- Epilepsija i drugi konvulzivni poremećaji
- Sklonost keloidima i hipertrofičnim ožiljcima
- Poremećaji zgrušavanja krvi i terapija antikoagulansima (osobito kod mikroiglične RF)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



RF komponenta	zagrijava potkožno tkivo, potiče kolagen
EMS komponenta	kontrakcije mišića ispod tretirane zone

Česta pitanja

Po čemu se razlikuje od Tesla HIEMT uređaja?

Tesla je specijalist za izgradnju mišića maksimalnim kontrakcijama; TrueRF balansira mast, mišić i kožu u jednom pristupačnijem uređaju.

Je li tretman naporan?

Ne — intenzitet EMS-a se postupno diže prema toleranciji klijenta.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska