



KRIOLIPOLIZA

Delux CryoVac

Četiri zone istovremeno

Kriolipoliza

Tijekom tretmana aplikator vakuumom uvlači nabor kože s masnim tkivom u glavu uređaja te ga kontrolirano hladi na temperaturu koja je za masne stanice štetna, ali za kožu, živce i mišiće sigurna (obično u rasponu od približno -11 °C do +5 °C na razini tkiva). Masne stanice (adipociti) osjetljivije su na hladnoću od okolnih struktura, pa se pri tim temperaturama pokreće proces programirane stanične smrti - apoptoze.

Princip djelovanja

Hladnoća izaziva kristalizaciju unutarstaničnih lipida i ishemijski stres koji aktivira apoptotske puteve (uz enzime kao što su kaspaze), zbog čega oštećene masne stanice postupno propadaju. Tijelo potom pokreće blagu upalnu reakciju u kojoj makrofagi (bijele krvne stanice) tijekom sljedećih tjedana i mjeseci uklanjaju mrtve stanice i njihov sadržaj. Razgrađene masnoće se prirodnim putem izlučuju kroz limfni sustav i metaboliziraju u jetri.



Što se realno postiže

Realno se po jednom tretmanu (ciklusu) na obrađenom području može očekivati smanjenje debljine masnog sloja od približno 15 do 28 %, što je klinički dokumentiran raspon. Rezultati su postupni: prve promjene obično se počinju nazirati oko 3 tjedna nakon tretmana, izraženije poboljšanje vidljivo je oko 2 mjeseca, a konačni rezultat stabilizira se u razdoblju od 3 do 6 mjeseci, kada tijelo dovrši prirodno uklanjanje razgrađenih stanica. Za izraženije naslage ili veći efekt često je potrebno više tretmana istog područja.

Ključne prednosti

Četiri zone istovremeno

Četiri aplikatora omogućuju tretiranje do 4 područja odjednom — veći prihod po satu rada.

Kriolipoliza + RF

Uz zamrzavanje masnih stanica, radiofrekvencija dodatno učvršćuje kožu i smanjuje celulit.

Bez oporavka

Neinvazivno i bezbolno — klijent se odmah vraća dnevnim aktivnostima.

Za koje tretmane

Trbuh

Leđa

Bokovi

Nadlaktice

Podbradak

BROJ TRETMANA

1–3 tretmana po istom području (najčešće 2–3 ciklusa za izraženiji i vidljiviji rezultat)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

6–8 tjedana između tretmana istog područja (minimalno 4–6 tjedana, da tijelo stigne prirodno ukloniti razgrađene masne stanice)

Tijek tretmana u salonu

Kriolipoliza se koristi za neinvazivno smanjenje lokaliziranih, tvrdokornih masnih naslaga koje ne popuštaju ni uz pravilnu prehranu ni tjelovježbu. Najčešće se tretira trbuh, bokovi i „ljubavne ručice“ (slabine), unutarnja i vanjska strana bedara, nadlaktice, leđa i naslage iznad grudnjaka te područje ispod stražnjice. Manjim aplikatorima tretira se i podbradak, odnosno tzv. dvostruka brada u području lica i vrata.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Krioglobulinemija (hladnoća uzrokuje zgrušavanje proteina u krvi) - apsolutna kontraindikacija
- Paroksizmalna hladna hemoglobinurija - apsolutna kontraindikacija
- Bolest hladnih aglutinina (cold agglutinin disease) - apsolutna kontraindikacija
- Hladna urtikarija (koprivnjača izazvana hladnoćom) - apsolutna kontraindikacija
- Raynaudov fenomen/sindrom te druge preosjetljivosti na hladnoću (uklj. pernio / chilblains)
- Trudnoća i razdoblje dojenja
- Aktivni onkološki (maligni) pacijenti - ne provoditi bez odobrenja liječnika
- Kila (hernija) ili oslabljena trbušna stijenka (npr. dijasaza rektusa, područje uz ožiljak) u ili neposredno uz zonu tretmana
- Otvorene rane, aktivne infekcije, ekcem, psorijaza ili dermatitis na području tretmana
- Smanjen osjet u koži / neuropatija (npr. dijabetička) na tretiranom području - normalan osjet je nužan za sigurnost
- Izražene varikozne vene, tromboflebitis, slaba periferna cirkulacija ili bolest perifernih krvnih žila u zoni tretmana
- Teški ili loše regulirani dijabetes (rizik slabijeg cijeljenja i cirkulacije) - potreban oprez
- Poremećaji zgrušavanja krvi ili terapija antikoagulansima (rizik izraženijih modrica) - oprez i konzultacija
- Autoimune bolesti vezivnog tkiva (lupus, vaskulitis, reumatoidni artritis, Sjögren) i stanja oslabljenog imuniteta - oprez (hladnoća može pogoršati stanje)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Aplikatori	4 ručke — do 4 zone istovremeno
Tehnologija	Kontrolirano hlađenje s funkcijom grijanja
Dodatno	Kombinacija kriolipolize i radiofrekvencije
Kontrola	Digitalno upravljanje temperaturom i trajanjem

Česta pitanja

Kada se vide rezultati?

Prve promjene nakon tri tjedna, najbolji rezultati nakon dva mjeseca.

Vraća li se masnoća?

Uklonjene masne stanice se ne obnavljaju; uz stabilnu težinu rezultat je trajan.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska