



PRESOTERAPIJA (LIMFNA DRENAŽA)

Presoterapija U-TECH

Pneumatska limfna drenaža

Presoterapija (limfna drenaža)

Uređaj se sastoji od navlaka za noge, ruke ili trbuh/bokove u kojima je ugrađen niz zračnih komora povezanih s programibilnom zračnom pumpom. Komore se napuhuju sekvencijski, u valovima, redosljedom od perifernih prema središnjim dijelovima tijela (distalno prema proksimalno — primjerice od stopala prema preponama), čime se oponaša prirodni smjer otjecanja limfe.

Princip djelovanja

Ritmичni, kontrolirani pritisak mehanički potiskuje limfu i višak međustanične tekućine prema limfnim čvorovima i venskom sustavu te smanjuje intersticijski tlak u tkivu. Time se ubrzava odvodnja toksina i metaboličkih otpadnih tvari, potiču se limfni čvorovi i poboljšava mikrocirkulacija. Jačina pritiska, smjer i trajanje ciklusa podesivi su prema potrebama korisnika, a napredniji uređaji nude odabir programa i pojedinih zona tijela.

Što se realno postiže

Već nakon prvog tretmana većina korisnika osjeti olakšanje, lakše i manje umorne noge te blago smanjenje otekline, osobito uvečer ili nakon dugotrajnog stajanja i sjedenja. Vidljiviji učinci na cirkulaciji, retenciji tekućine i izgledu celulita razvijaju se postupno, kroz seriju tretmana. Važno je biti realan: presoterapija nije metoda za trajno mršavljenje niti zamjena za zdrav način života, a dio smanjenja opsega posljedica je otpuštanja viška tekućine.

Ključne prednosti

Limfna drenaža i detoksikacija

Ritmički valovi tlaka potiču limfni tok i izbacivanje toksina te viška tekućine.

Smanjenje celulita

Redoviti tretmani smanjuju celulit i zadržavanje vode, oblikuju tijelo.

Za koje tretmane

Noge

Trbuh

Ruke

Cijelo tijelo

BROJ TRETMANA

6–10 tretmana (minimalno 6 za prve vidljive rezultate, oko 10 za optimalan učinak)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

1–2 puta tjedno tijekom aktivne serije; za održavanje rezultata 1–2 puta mjesečno

Tijek tretmana u salonu

Presoterapija se koristi za poticanje limfne drenaže i cirkulacije na tijelu — najčešće na nogama, rukama, bokovima, stražnjici i trbuhu, ovisno o navlakama uređaja (nije riječ o tretmanu lica). Najčešće indikacije su osjećaj teških i umornih nogu, zadržavanje vode (retencija tekućine), otekline te blaga do umjerena limfna i venska staza. Redovito se preporučuje osobama koje dugo sjede ili stoje, sportašima za bržu regeneraciju mišića i smanjenje otekline te u sklopu anticelulitnih programa i programa oblikovanja tijela i mršavljenja. Primjenjuje se i za detoksikaciju i opći osjećaj lakoće, kao i za postoperativni oporavak i smanjenje otekline nakon estetskih zahvata (uz odobrenje liječnika).

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Duboka venska tromboza (DVT), tromboflebitis, embolija ili sumnja na krvni ugrušak
- Akutne infekcije, upalna stanja ili povišena tjelesna temperatura (vrućica)
- Akutni erizipel (crveni vjetar), limfangitis ili druga akutna infekcija/upala kože na području tretmana
- Aktivna tuberkuloza
- Teža (dekompensirana) srčana insuficijencija i nekontrolirane kardiovaskularne bolesti
- Ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker) ili drugi elektronički implantat — bez prethodnog odobrenja liječnika
- Aktivna zloćudna bolest (rak) ili onkološko liječenje; nedavno preboljeli karcinom samo uz odobrenje onkologa
- Trudnoća i razdoblje dojenja (samo uz odobrenje liječnika)
- Nekontrolirana hipertenzija (visoki krvni tlak)
- Teža bubrežna ili jetrena insuficijencija; oprez kod dijalize (dodatna drenaža može opteretiti sustav)
- Akutni edem (otok) pluća
- Poremećaji zgrušavanja krvi, sklonost krvarenju, terapija antikoagulansima ili aktivno krvarenje
- Otvorene rane, opekline, dermatitis, ekcem ili infekcije kože na području tretmana
- Uznapredovale proširene vene s komplikacijama i akutna venska oboljenja

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 75 W
Radni tlak	0,32 bar
Nastavci	Odjelo za noge i ruke, širina komora 7 cm
Tehnologija	Sekvencijalna pneumatska kompresija

Česta pitanja

Koliko često se radi?

Preporučuje se 2–3 puta tjedno kroz mjesec dana, zatim održavanje 1 × tjedno.

Za koga nije?

Nije preporučeno pri akutnim trombozama, srčanim oboljenjima, infekcijama ili trudnoći.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska