



HIFEM / EMS

Tesla HIEMT PRO MAX 5


Supramaksimalne kontrakcije, sedam aplikatora

HIFEM / EMS

HIFEM aparat stvara snažno, fokusirano elektromagnetsko polje koje bez oštećenja prolazi kroz kožu i potkožno masno tkivo te depolarizira motoričke neurone u ciljanom mišiću. Time se izazivaju supramaksimalne kontrakcije, znatno intenzivnije nego što je moguće voljnom vježbom; broj kontrakcija i trajanje tretmana ovise o modelu uređaja i odabranom protokolu.

Princip djelovanja

Kao odgovor na to ekstremno opterećenje mišić se prilagođava hipertrofijom (zadebljanje mišićnih vlakana) i hiperplazijom (povećanje broja vlakana), što daje čvršći i definiraniji izgled. Istovremeno, tako intenzivne kontrakcije pokreću pojačanu lipolizu u masnom tkivu neposredno uz mišić: oslobađaju se slobodne masne kiseline koje preopterećene masne stanice (adipocite), a dio ih odumire procesom apoptoze i prirodno se izlučuje iz tijela. Klasična EMS tehnologija djeluje sličnim načelom, ali putem elektroda na koži i uglavnom površnije.

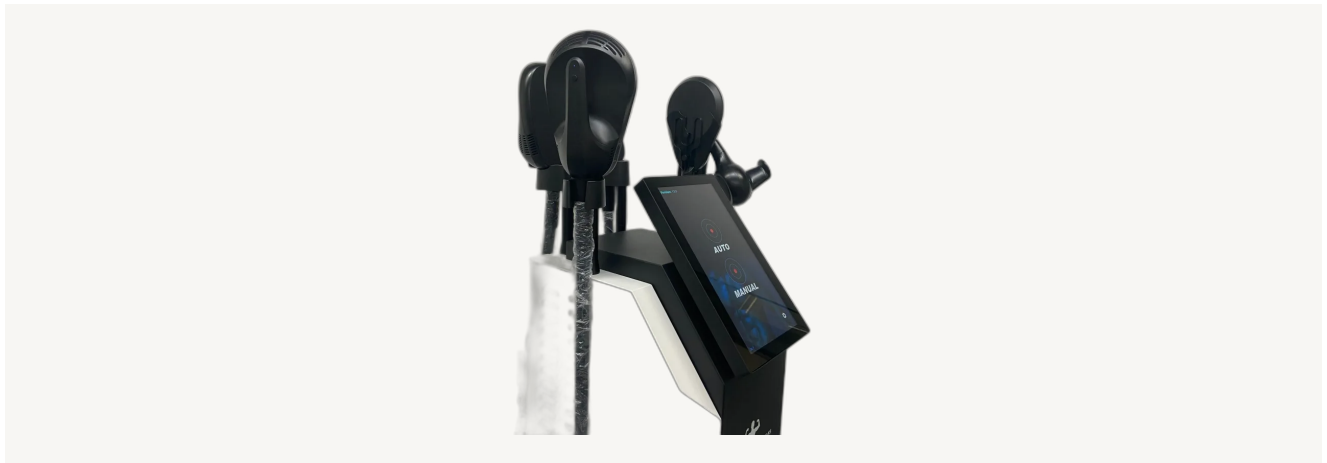

Što se realno postiže

Klinička istraživanja koja su rezultate mjerila magnetskom rezonancom (MRI) pokazala su u prosjeku oko 15–16% povećanja debljine mišića i približno 18–19% smanjenja debljine masnog sloja u tretiranom području, uz prosječno smanjenje opsega struka od otprilike 3–4 cm, mjereno 2–3 mjeseca nakon serije od četiri tretmana. Prvi osjećaj čvršćih i zategnutijih mišića klijenti obično primijete unutar 2 do 4 tjedna od početka serije. Najbolji, potpuni rezultati vidljivi su otprilike 2 do 3 mjeseca nakon zadnjeg tretmana, kada dovrši proces mišićne pregradnje i uklanjanja masnih stanica.

Ključne prednosti

Do 30.000 kontrakcija po tretmanu

Jedan tretman = do 30.000 trbušnjaka — supramaksimalne kontrakcije bez znoja, boli i oporavka.

Sedam aplikatora, dvije zone istovremeno

Trbuh + stražnjica ili obje ruke + obje noge u jednom terminu — najveći kapacitet u Tesla liniji.

Savršen par: Tesla PRO MAX 5 + Laser 1060 ili Cryo360

Najprije skini masni sloj, zatim izgradi i definiraj mišić ispod njega.

Za koje tretmane

Trbuh

Stražnjica

Bedra

Nadlaktice

Listovi

BROJ TRETMANA

4–6 tretmana za vidljiv rezultat (ovisno o području i cilju
obično 4–8 tretmana)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

Razmak 2–5 dana između tretmana, najčešće 2–3 tretmana
tjedno; cijela serija odradi se unutar 2–4 tjedna

Tijek tretmana u salonu

HIFEM/EMS aparat za tijelo koristi se za nekirurško oblikovanje tijela — istovremeno jačanje, definiranje i povećanje volumena mišića uz redukciju lokaliziranih masnih naslaga. Najčešće se tretira trbuh (jačanje trbušnog zida, smanjenje dijastaze rekta), gluteusi (podizanje i oblikovanje stražnjice bez implantata), nadlaktice (biceps i triceps), te bedra i listovi. Verzije s posebnim aplikatorom ili tzv. stolicom koriste se za jačanje mišića dna zdjelice, primjerice kod blage urinarne inkontinencije nakon poroda.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća ili sumnja na trudnoću
- Dojenje / razdoblje laktacije
- Ugrađeni srčani stimulator (pacemaker), defibrilator (ICD) ili neurostimulator
- Bilo koji elektronički implantat ili implantirana pumpa za lijekove (npr. inzulinska pumpa)
- Metalni implantati u ili blizu tretiranog područja (pločice, vijci, spajalice, umjetni zglobovi, endoproteze) — rizik zagrijavanja i pomicanja
- Bakrena spirala (bakreni IUD) ili druga spirala s metalom u području tretmana
- Metalni piercing, nakit ili drugi metalni predmeti u području tretmana — ukloniti prije tretmana
- Aktivna zloćudna bolest (maligni tumor); ne tretirati iznad ili blizu tumorskih lezija; onkološki pacijenti samo uz odobrenje liječnika
- Hemoragijska stanja i poremećaji zgrušavanja krvi (dekompenzirani)
- Terapija antikoagulansima (razrjeđivači krvi) — povećan rizik krvarenja i modrica, uz procjenu liječnika
- Epilepsija i drugi napadaji
- Povišena tjelesna temperatura, vrućica ili akutna infekcija
- Teška plućna insuficijencija / srčano-plućna dekompenzacija
- Ozbiljne srčane bolesti i poremećaji srčanog ritma (aritmije)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Tehnologija	MagForce™ HIFEM — visokointenzivno fokusirano elektromagnetsko polje
Maksimalna snaga	9 Tesla
Aplikatori	7 — dvije zone istovremeno
Kontrakcije po tretmanu	do 30.000 (ekvivalent 30.000 trbušnjaka)
Trajanje	30 minuta po zoni
Načini rada	automatski i ručni

Česta pitanja

Kako izgleda tretman?

Aplikator se pričvrsti na zonu; osjećaju se snažne, bezbolne kontrakcije mišića koje se postupno pojačavaju.

Ima li upala mišića nakon tretmana?

Blagi osjećaj "odrađenog treninga" sljedeći dan je normalan i prolazi brzo.

Za koga tretman nije?

Osobe s pacemakerom, metalnim implantatima u zoni, trudnice; potpuni popis na edukaciji.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



deluXart

Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska