



HIFEM / EMS

Tesla HIEMT MAX 4

Četiri aplikatora, 30.000 kontrakcija


HIFEM / EMS

Tesla HIEMT MAX 4 samostojeći je uređaj za neinvazivne body sculpting tretmane, namijenjen istovremenom radu na mišićnoj strukturi i tjelesnim konturama.

HIFEM aparat stvara snažno, fokusirano elektromagnetsko polje koje bez oštećenja prolazi kroz kožu i potkožno masno tkivo te depolarizira motoričke neurone u ciljanom mišiću.

Princip djelovanja

Time se izazivaju supramaksimalne kontrakcije, znatno intenzivnije nego što je moguće voljnom vježbom; broj kontrakcija i trajanje tretmana ovise o modelu uređaja i odabranom protokolu. Kao odgovor na to ekstremno opterećenje mišić se prilagođava hipertrofijom (zadebljanje mišićnih vlakana) i hiperplazijom (povećanje broja vlakana), što daje čvršći i definiraniji izgled. Istovremeno, tako intenzivne kontrakcije pokreću pojačanu lipolizu u masnom tkivu neposredno uz mišić: oslobađaju se slobodne masne kiseline koje preopterećene masne stanice (adipocite), a dio ih odumire procesom apoptoze i prirodno se izlučuje iz tijela.

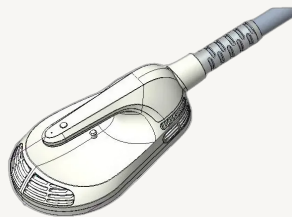

Što se realno postiže

Klinička istraživanja koja su rezultate mjerila magnetskom rezonancom (MRI) pokazala su u prosjeku oko 15–16% povećanja debljine mišića i približno 18–19% smanjenja debljine masnog sloja u tretiranom području, uz prosječno smanjenje opsega struka od otprilike 3–4 cm, mjereno 2–3 mjeseca nakon serije od četiri tretmana. Prvi osjećaj čvršćih i zategnutijih mišića klijenti obično primijete unutar 2 do 4 tjedna od početka serije.

Ključne prednosti

HIEMT — elektromagnetsko polje visokog intenziteta

Polje visokog intenziteta izaziva snažne, ponavljajuće kontrakcije mišića radi stimulacije, jačanja, toniranja i...

EMS uz HIEMT — dva načina rada

M1 pušta EMT i EMS istovremeno, M2 najprije EMS pa EMT. Protokol se bira prema zoni i klijentu.

Četiri ručke u dva para

Dvije za trbuh i stražnjicu, dvije zakrivljene za ruke i noge. Par A1/A2 i par B1/B2 imaju svaki svoje parametre.

Dvoslojna zavojnica od 129 mm

Razvijena za snažno elektromagnetsko polje i dubinsku stimulaciju velikih skeletnih mišićnih skupina.

Za koje tretmane

- Neinvazivno oblikovanje tijela
- Izgradnja i jačanje mišića
- Toniranje i poboljšanje mišićne definicije
- Redukcija lokaliziranog masnog tkiva
- Oblikovanje abdomena i glutealne regije
- Tretmani bedara i listova
- Tretmani bicepsa i tricepsa
- Body sculpting tretmani za žene i muškarce

BROJ TRETMANA

4–6 tretmana za vidljiv rezultat (ovisno o području i cilju obično 4–8 tretmana)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

Razmak 2–5 dana između tretmana, najčešće 2–3 tretmana tjedno; cijela serija odradi se unutar 2–4 tjedna

Tijek tretmana u salonu

HIFEM/EMS aparat za tijelo koristi se za nekirurško oblikovanje tijela — istovremeno jačanje, definiranje i povećanje volumena mišića uz redukciju lokaliziranih masnih naslaga. Najčešće se tretira trbuh (jačanje trbušnog zida, smanjenje dijastaze rekta), gluteusi (podizanje i oblikovanje stražnjice bez implantata), nadlaktice (biceps i triceps), te bedra i listovi. Verzije s posebnim aplikatorom ili tzv. stolicom koriste se za jačanje mišića dna zdjelice, primjerice kod blage urinarne inkontinencije nakon poroda.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća ili sumnja na trudnoću
- Dojenje / razdoblje laktacije
- Ugrađeni srčani stimulator (pacemaker), defibrilator (ICD) ili neurostimulator
- Bilo koji elektronički implantat ili implantirana pumpa za lijekove (npr. inzulinska pumpa)
- Metalni implantati u ili blizu tretiranog područja (pločice, vijci, spajalice, umjetni zglobovi, endoproteze) — rizik zagrijavanja i pomicanja
- Bakrena spirala (bakreni IUD) ili druga spirala s metalom u području tretmana
- Metalni piercing, nakit ili drugi metalni predmeti u području tretmana — ukloniti prije tretmana
- Aktivna zloćudna bolest (maligni tumor); ne tretirati iznad ili blizu tumorskih lezija; onkološki pacijenti samo uz odobrenje liječnika
- Hemoragijska stanja i poremećaji zgrušavanja krvi (dekompenzirani)
- Terapija antikoagulansima (razrjeđivači krvi) — povećan rizik krvarenja i modrica, uz procjenu liječnika
- Epilepsija i drugi napadaji
- Povišena tjelesna temperatura, vrućica ili akutna infekcija
- Teška plućna insuficijencija / srčano-plućna dekompenzacija
- Ozbiljne srčane bolesti i poremećaji srčanog ritma (aritmije)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Model	EMT8-4S-MAX4	par A1/A2 i par B1/B2, svaki sa svojim parametrima
Izvedba	samostojeća	
Tehnologija	HIEMT + EMS	Intenzitet
Maksimalna magnetska snaga	8 Tesla	1–100 %, podesivo po paru ručki
Zavojnica	129 mm, dvoslojna	Trajanje tretmana
Duljina pulsa	360 µs	1–30 min (zadano 30); 15–20 min po zoni
Upravljanje	10,2" LCD zaslon osjetljiv na dodir	Načini rada
Radna frekvencija	maks. 135 Hz (u ručnom načinu podesivo 1–120 Hz)	AUTO i MANUAL
Aplikatori	4 — dvije za trbuh i stražnjicu, dvije zakrivljene za ruke i noge;	EMS načini
		M1 — EMT i EMS istovremeno; M2 — prvo EMS, zatim EMT
		Hlađenje
		zračno
		Napajanje
		AC 100–240 V, 50/60 Hz
		Izlazna snaga
		1700 VA
		Opcijski dodatak
		aplikator za oporavak nakon poroda (opcijski)

Česta pitanja

Koliko kontrakcija po tretmanu?

Do 30.000 supramaksimalnih kontrakcija u jednoj 30-minutnoj sesiji.

Je li tretman bolan?

Ne — osjećaju se snažne, ali bezbolne mišićne kontrakcije; intenzitet se prilagođava.

Za koga nije?

Osobe s pacemakerom, metalnim implantatima u zoni ili trudnice; potpuni popis na edukaciji.

Ponuda uključuje

- Uređaj Tesla HIEMT MAX 4 (1 kom)
- Radne ručke — aplikatori (4 kom)
- Nosač za aplikatore (2 kom) i kabel napajanja
- Pojasevi za fiksaciju: 0,75 m (2 kom), 1,5 m (1 kom), 0,8 m (2 kom)
- Imbus ključ i vijci, rezervni osigurač, priručnik

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga

Jamstvo: 12 mjeseci na uređaj. Jamstvo ne pokriva mehanička, odnosno fizička oštećenja.



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska