



HIFEM / EMS

Tesla HIEMT PRO MAX 3S

HIFEM trening mišića, četiri ručke

HIFEM / EMS

Tesla HIEMT PRO MAX 3S samostojeći je HIEMT uređaj s četiri ručke, za jačanje mišića i redukciju masnog tkiva bez EMS modula.

HIFEM aparat stvara snažno, fokusirano elektromagnetsko polje koje bez oštećenja prolazi kroz kožu i potkožno masno tkivo te depolarizira motoričke neurone u ciljanom mišiću.

Princip djelovanja

Time se izazivaju supramaksimalne kontrakcije, znatno intenzivnije nego što je moguće voljnom vježbom; broj kontrakcija i trajanje tretmana ovise o modelu uređaja i odabranom protokolu. Kao odgovor na to ekstremno opterećenje mišić se prilagođava hipertrofijom (zadebljanje mišićnih vlakana) i hiperplazijom (povećanje broja vlakana), što daje čvršći i definiraniji izgled. Istovremeno, tako intenzivne kontrakcije pokreću pojačanu lipolizu u masnom tkivu neposredno uz mišić: oslobađaju se slobodne masne kiseline koje preoptereće masne stanice (adipocite), a dio ih odumire procesom apoptoze i prirodno se izlučuje iz tijela.



Što se realno postiže

Klinička istraživanja koja su rezultate mjerila magnetskom rezonancom (MRI) pokazala su u prosjeku oko 15–16% povećanja debljine mišića i približno 18–19% smanjenja debljine masnog sloja u tretiranom području, uz prosječno smanjenje opsega struka od otprilike 3–4 cm, mjereno 2–3 mjeseca nakon serije od četiri tretmana. Prvi osjećaj čvršćih i zategnutijih mišića klijenti obično primijete unutar 2 do 4 tjedna od početka serije.

Ključne prednosti

Do 20.000 kontrakcija po tretmanu

Supramaksimalne kontrakcije grade mišić i troše masnoću u jednom tretmanu, dvije neovisne ručke skraćuju vrijeme.

PRO MAX 3S ili PRO MAX 5?

3S pokriva sve standardne protokole za jednog klijenta; PRO MAX 5 dodaje kapacitet za više zona istovremeno (7...

Opcija: aplikator za dno zdjelice

Dodatni opcionalni aplikator za postporođajni oporavak i inkontinenciju — proširuje ponudu salona.

Za koje tretmane

Trbuh

Stražnjica

Bedra

Biceps

Triceps

Listovi

BROJ TRETMANA

4–6 tretmana za vidljiv rezultat (ovisno o području i cilju
obično 4–8 tretmana)

RAZMAK IZMEĐU TRETMANA

Razmak 2–5 dana između tretmana, najčešće 2–3 tretmana
tjedno; cijela serija odradi se unutar 2–4 tjedna

Tijek tretmana u salonu

HIFEM/EMS aparat za tijelo koristi se za nekirurško oblikovanje tijela — istovremeno jačanje, definiranje i povećanje volumena mišića uz redukciju lokaliziranih masnih naslaga. Najčešće se tretira trbuh (jačanje trbušnog zida, smanjenje dijastaze rekta), gluteusi (podizanje i oblikovanje stražnjice bez implantata), nadlaktice (biceps i triceps), te bedra i listovi. Verzije s posebnim aplikatorom ili tzv. stolicom koriste se za jačanje mišića dna zdjelice, primjerice kod blage urinarne inkontinencije nakon poroda.

Kontraindikacije — provjeriti prije tretmana

- Trudnoća ili sumnja na trudnoću
- Dojenje / razdoblje laktacije
- Ugrađeni srčani stimulator (pacemaker), defibrilator (ICD) ili neurostimulator
- Bilo koji elektronički implantat ili implantirana pumpa za lijekove (npr. inzulinska pumpa)
- Metalni implantati u ili blizu tretiranog područja (pločice, vijci, spajalice, umjetni zglobovi, endoproteze) — rizik zagrijavanja i pomicanja
- Bakrena spirala (bakreni IUD) ili druga spirala s metalom u području tretmana
- Metalni piercing, nakit ili drugi metalni predmeti u području tretmana — ukloniti prije tretmana
- Aktivna zloćudna bolest (maligni tumor); ne tretirati iznad ili blizu tumorskih lezija; onkološki pacijenti samo uz odobrenje liječnika
- Hemoragijska stanja i poremećaji zgrušavanja krvi (dekompenzirani)
- Terapija antikoagulansima (razrjeđivači krvi) — povećan rizik krvarenja i modrica, uz procjenu liječnika
- Epilepsija i drugi napadaji
- Povišena tjelesna temperatura, vrućica ili akutna infekcija
- Teška plućna insuficijencija / srčano-plućna dekompenzacija
- Ozbiljne srčane bolesti i poremećaji srčanog ritma (aritmije)

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Model	EMT8-4S-MAX3	par A1/A2 i par B1/B2, svaki sa svojim parametrima
Izvedba	samostojeća	
Tehnologija	HIEMT (bez EMS-a)	Intenzitet 1–100 %, podesivo po paru ručki
Maksimalna magnetska snaga	do 8 Tesla	Trajanje tretmana 1–30 min (zadano 30); 15–20 min po zoni
Kontraksije po tretmanu	do 20.000	Načini rada AUTO i MANUAL
Upravljanje	LCD zaslon osjetljiv na dodir	Hlađenje zračno
Radna frekvencija	maks. 135 Hz (u ručnom načinu podesivo 1–120 Hz)	Napajanje AC 100–240 V, 50/60 Hz
Aplikatori	4 — dvije za trbuh i stražnjicu, dvije zakrivljene za ruke i noge;	Izlazna snaga 1700 VA
		Opcijski dodatak aplikator za oporavak nakon poroda (opcijski)

Česta pitanja

Zamjenjuje li tretman teretanu?

Ne zamjenjuje zdrav život, ali postiže intenzitet mišićnog rada nedostižan voljnim treningom.

Je li tretman bolan?

Ne — osjećaju se intenzivne, ali bezbolne kontrakcije; intenzitet se prilagođava.

Ponuda uključuje

- Uređaj Tesla HIEMT PRO MAX 3S (1 kom)
- Radne ručke — aplikatori (4 kom)
- Nosač za aplikatore (2 kom) i kabel napajanja
- Pojasevi za fiksaciju: 0,75 m (2 kom), 1,5 m (1 kom), 0,8 m (2 kom)
- Imbus ključ i vijci, rezervni osigurač, priručnik

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga

Jamstvo: 12 mjeseci na uređaj. Jamstvo ne pokriva mehanička, odnosno fizička oštećenja.



Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska